

# BeneHeart Review

## Übersicht und Information

### Übersicht


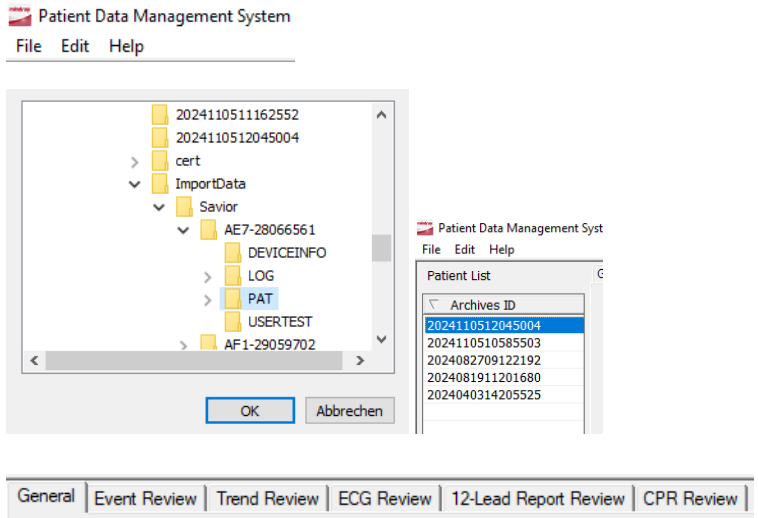
BeneHeart Review ist eine kostenlose, lokal installierte Softwareversion von Mindray zur Auswertung der Falldaten von Mindray AEDs (Mindray BeneHeart C1A, Mindray BeneHeart C2).

### Software

Die Software wird Ihnen von uns bereitgestellt. Bitte kontaktieren Sie uns, und wir stellen Ihnen die Software umgehend zur Verfügung.

Die Software und deren Nutzung sind kostenlos, jedoch muss sie als Administrator heruntergeladen werden, da die PDFs ansonsten Wasserzeichen enthalten.

### Ablauf Datenimport und Export BeneHeart Review

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. AED vorbereiten <ul style="list-style-type: none"> <li>Die beiden Schrauben auf der Rückseite entfernen und den Deckel öffnen.</li> <li>USB-Stick in den Slot einstecken.</li> <li>Vorderen Deckel des AED öffnen und 10 Sekunden offen lassen, somit werden die Falldaten übertragen.</li> <li>Den Deckel nach 10 Sekunden schliessen, USB Stick entfernen und den Deckel wieder anschrauben.</li> </ul> </li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Falldaten importieren / auswerten <ul style="list-style-type: none"> <li>BeneHeart Review starten. Unter „File“ den Punkt „Import“ wählen und zum USB Stick navigieren mit den exportierten Daten: Savior → Seriennummer des AEDs auswählen → PAT Ordner anklicken und mit OK bestätigen.</li> <li>Den gewünschten Fall links unter „Archives ID“ anklicken.</li> <li>Über die Tabs im BeneHeart Review, können alle Informationen eingesehen werden.</li> </ul> <p>Wie folgt kann man die Übersicht zur EKG Kurve ausdrucken oder als Datei speichern: ECG Review → Print</p> </li> </ol>	

# BeneHeart Review

## Übersicht und Information

### Darstellung

