










OSITECH Bedienungsanleitung (für M-Serie)

12 Lead Übermittlung durchführen (Neues EKG erfassen)




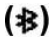



1.  Softkey-Taste **<12 Abl.>** drücken.
2.  **<Erfassen>** drücken. Und warten bis Analyse beendet ist.
(12 Lead EKG muss angeschlossen sein)
3.  Ziel mit **<Vorige Tel.-Nr.>** oder **<Nächste Tel.-Nr.>** anwählen und mit **<Tel.-Nr. wählen>** bestätigen.
(Übertragungs-Handy muss eingeschaltet sein)
4.  Wenn Meldung „**FAX FERTIG**“ erscheint, war die 12 Lead Übermittlung erfolgreich.

12 Lead Übermittlung durchführen (Hinterlegtes EKG senden)

1.  Softkey-Taste **<12 Abl.>** drücken.
2.  **<PT-Info>** und dann **<Patienten-Akten>** drücken.
3.  Das gewünschte EKG anwählen und mit **<Senden>** bestätigen.
(Handy muss eingeschaltet sein)
4.  Ziel mit **<Vorige Tel.-Nr.>** oder **<Nächste Tel.-Nr.>** anwählen und mit **<Tel.-Nr. wählen>** bestätigen.
(Übertragungs-Handy muss eingeschaltet sein)
5.  Wenn Meldung „**FAX FERTIG**“ erscheint, war die 12 Lead Übermittlung erfolgreich.

Fehlersuche:

Bei einer Meldung „**FAX-Fehler**“ folgende Dinge überprüfen:

1.  Sicherstellen, dass Übermittlungs-Handy eingeschaltet und Netzempfang vorhanden ist
2.  Sicherstellen, dass folgende Symbole auf dem Handy während der FAX-Übermittlung aktiv werden:
 →  (Bluetooth-Verbindung mit Defi aktiv)
 →  (Internet-Verbindung aktiv)
3.  Sicherstellen, dass FAX-Nummer korrekt ist (inkl. Schweizer Vorwahl 0041)