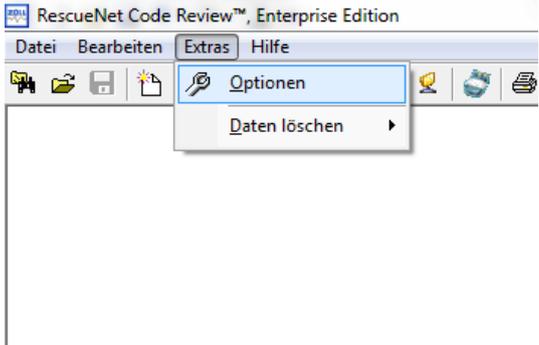
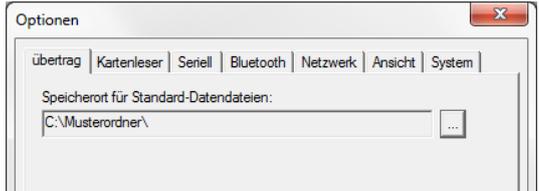
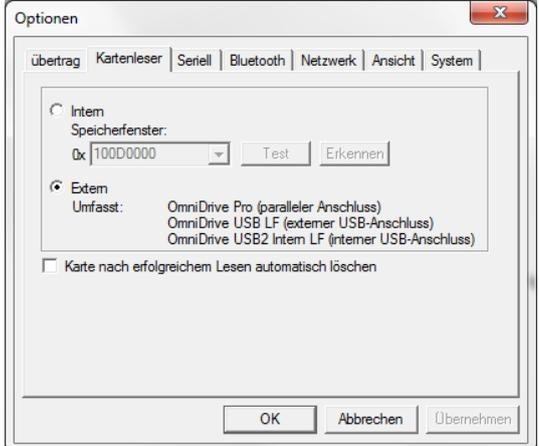


<h2>Daten über PCMCIA Karte auslesen (Setup)</h2> <p>ausführliche Dokumentation unter: www.zolldata.com/c-r-downloads</p>		
<p>1.</p>	<p>Externe Kartenleser OmniDrive installieren</p> <p>Win 32bit: <i>OmniDrive USB Driver (V3.12)</i> Win 64bit: <i>OmniDrive USB_64bit Driver (V3.31)</i></p>	
<p>2.</p>	<p>RescueNet CodeReview installieren</p> <p>Aktuellste Version unter: www.zolldata.com/c-r-downloads</p> <p>Voraussetzung: Microsoft .NET Framework 4.0 (Auf derselben Web-Seite verfügbar)</p>	
<p>3.</p>	<p>RecueNet CodeReview starten und Optionen-Menü starten</p>	
<p>4.</p>	<p>Im Bereich „übertrag“ den gewünschten Speicherort für importierte Fälle auswählen</p> <p><i>Wichtig: Der Anwender benötigt im gewählten Pfad Schreibzugriff</i></p>	
<p>5.</p>	<p>Im Bereich „Kartenleser“ den Punkt „Extern“ anwählen</p> <p>Falls gewünscht: Häkchen für automatische Löschung aktivieren</p>	

6. Konfiguration im Defi überprüfen

1. *Systemkonfiguration starten*
(Während des Einschaltens des Gerätes, linke und rechte Softkey-Taste gedrückt halten)
2. *Konfig.-Passwort eingeben*
(0 0 0 0 0 0 0 0)
3. *Sprache wählen und mit der Softkey-Taste <Eingabe> bestätigen*
4. *<Konfig. ändern> drücken*

ZOLL E-Series (Rev. 7.42):

Alle Werte sind im Menu-Bereich „Speicherkarte“ (Seite 6 von 7)

Dieser Wert muss auf „Ja“ konfiguriert werden:

- a) *Seite 1 von 4 (EKG AUFZEICHNEN IM BERATUNGS-BETR.)*

Diese Werte können individuell eingestellt werden:

- a) *Seite 1 von 4 (AUDIO AUFZEICHNEN IM BERATUNGS-BETR.)*
- b) *Seite 1 von 4 (SPO2 AUFZEICHNEN IM BERATUNGS-BETR.)*
- c) *Seite 2 von 4 (ETCO2 AUFZEICHNEN IM BERATUNGS-BETR.)*
- d) *Seite 2 von 4 (SPEICHERKARTE-FEHLER BERICHTEN)*
- e) *Seite 2 von 4 (KARTE LÖSCHEN OK)*
- f) *Seite 3 von 4 (KARTENKAPAZITÄT MELDUNG AKTIV.)*
- g) *Seite 3 von 4 (KARTE LÖSCHEN AUFF. B. AUSSCH.)*
- h) *Seite 3 von 4 (KARTE ENTN. AUFF. B. AUSSCH.)*
- i) *Seite 4 von 4 (DEFIB-SYNC AUSGESCHLOSSEN)*

ZOLL M-Series (Rev. 39.10):

Diese Werte müssen auf „Ja“ konfiguriert werden:

- a) *Seite 7 Punkt 3 (IN AUTO-ÜBERW.-BETR AUF KARTE SPEICHER)*
- b) *Seite 8 Punkt 3 (EKG AUFZEICHNEN IM BERATUNGS-BETR.)*

Diese Werte können individuell eingestellt werden:

- a) *Seite 1 Punkt 2 (KARTE LÖSCHEN OK)*
- b) *Seite 9 Punkt 1 (AUDIO AUFZEICHNEN IM BERATUNGS-BETR.)*
- c) *Seite 9 Punkt 2 (DEFIB-SYNC AUSGESCHLOSSEN)*
- d) *Seite 13 Punkt 3 (SPEICHERKARTE-FEHLER BERICHTEN)*
- e) *Seite 26 Punkt 1 (KARTENKAPAZITÄT MELDUNG AKTIV.)*
- f) *Seite 26 Punkt 2 (KARTE LÖSCHEN AUFF. B. AUSSCH.)*
- g) *Seite 26 Punkt 3 (KARTE ENTN. AUFF. B. AUSSCH.)*
- h) *Seite 29 Punkt 2 (DATEN ZU CPR AUFZEICHNEN)*