


INSTRUCTIONS

Changement de piles et électrodes ZOLL AED 3

Tirez sur la fiche de l'électrode pour la débrancher.
Insérez la nouvelle électrode.


La pile se trouve au dos. Elle est
fixée à l'appareil par encliquetage.

1

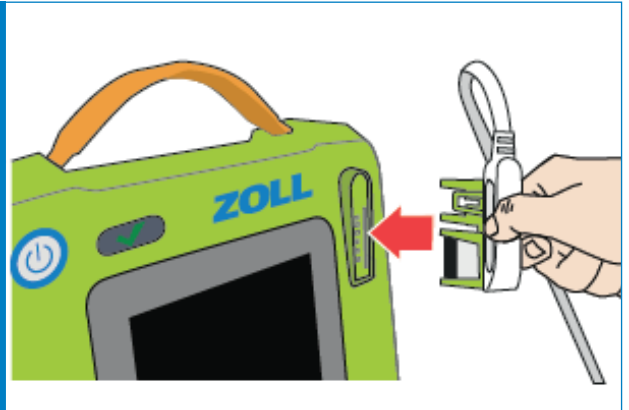

Retirez la pile, attendez 30 secondes, insérez la
nouvelle pile et appuyez fermement pour que les
deux parties à encliqueter s'emboîtent.

2

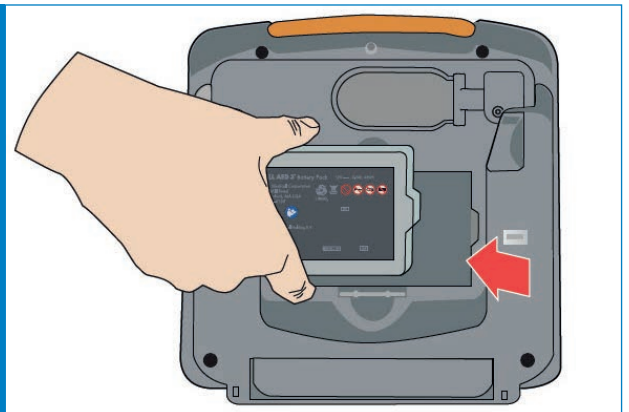

Rangez maintenant l'électrode au dos de l'AED,
dans le compartiment prévu à cet effet.

3



Attendez que l'appareil ait terminé son auto-
test automatique. Cela dure une soixantaine de
secondes.

L'indication de statut vous permet de savoir si
l'appareil est prêt à être utilisé.

4

