

# CompactCase

## Armoire murale intérieure

### Domaine d'application

Prévu et convient à une utilisation strictement à l'intérieur avec les AED suivants :

**ZOLL AED 3**  
Sans sacoche



**ZOLL AED Plus**  
avec ou sans sacoche



**Mindray BeneHeart C1A**  
sans sacoche




**Mindray BeneHeart C2**  
sans sacoche



### Spécificités

- Poids: 5 kg
- Matériau: métal
- Poignée de porte: aluminium
- ILCOR logo coeur sur chacune des faces latérales
- Couleur: blanc / vert (mate) revêtement en poudre
- Fenêtre: plastique

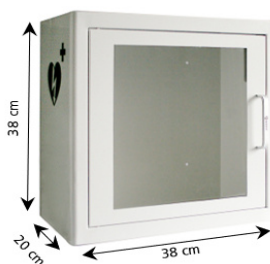

### Versions et contenu

CompactCase blanc	avec alarme acoustique	Réf. de commande: 60.112
CompactCase blanc light	sans alarme acoustique	Réf. de commande: 60.111
CompactCase vert	avec alarme acoustique	Réf. de commande: 60.122
CompactCase vert light	sans alarme acoustique	Réf. de commande: 60.121
Module alarme	peut être ajouté au CompactCase light	Réf. de commande: 69311

#### Contenu

- 1 x CompactCase (avec module d'alarme) ou CompactCase light (sans module d'alarme)
- 1 x poignée de porte avec vis
- 4 x vis, chevilles et rondelles pour le montage

### Module d'alarme optionnel

Alarme acoustique pour alerter la zone alentour. L'alarme se déclenche en ouvrant la porte et se stoppe à la fermeture. De plus, le module d'alarme peut être activé et désactivé séparément. Le module d'alarme peut être installé ultérieurement sur le CompactCase light à tout moment.

#### Spécifications du module d'alarme :

- Piles: 3 pièces, type AG13
- Autonomie de la batterie: environ 2 ans
- Niveau sonore: 105 dB

# CompactCase

## Instructions de montage

### Instructions de montage CompactCase

#### Contrôler la totalité de la commande

1. CompactCase
2. 4x vis de fixation
3. 4x chevilles
4. 4x rondelles
5. 1x poignée de porte métallique
6. 2x vis pour poignée de porte

# 1



#### Préparer la poignée

1. Ouvrir la poignée avec le cordon prémonté
2. Couper le cordon
3. Fixer la poignée de porte avec les deux vis


# 2



#### Montage du CompactCase

1. Placer le CompactCase à une hauteur bien visible (valeur indicative : 1,3 m à partir du sol) et marquer les quatre trous.
2. Percer quatre trous pour les chevilles
3. Monter le CompactCase

# 3

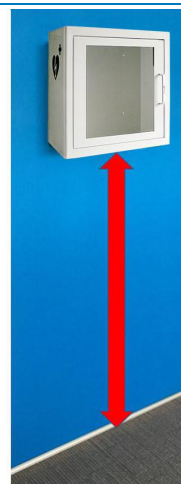

# Instructions de montage du module d'alarme

## CompactCase

### Montage du module d'alarme



1. Le module d'alarme se compose de l'alarme et d'un aimant. Les deux parties sont équipées d'une bande adhésive pour le montage.

#### Informations sur les piles

Type de pile : AG13


Quantité : 3 pcs.

Durée de vie : env. 2 ans



2. Retirer le film de protection de la bande adhésive au dos de l'alarme. Placer l'alarme dans le coin supérieur droit de l'armoire, l'interrupteur « ON/OFF » vers la droite (voir photo). S'assurer que l'alarme se trouve le plus à gauche possible du bord du cadre, afin qu'il y ait suffisamment de place pour la manipulation de l'interrupteur.

Appuyer ensuite l'alarme contre l'armoire pendant 10 secondes pour une adhérence optimale.

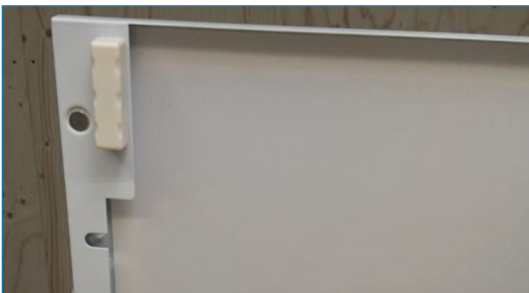

3. La distance entre l'alarme et l'aimant ne doit pas dépasser 10 mm. Monter l'aimant le plus près possible de l'alarme et le maintenir enfoncé pendant 10 secondes pour une adhérence optimale.



4. Mettre le module d'alarme en position « ON » pour tester l'alarme. Fermer ensuite la porte pour que l'alarme s'éteigne automatiquement.