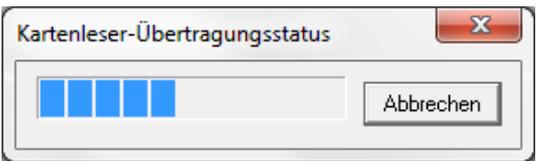


<h2>Télécharger des cas de la carte PCMCIA</h2> <p>You find full description under: <a href="http://www.zolldata.com/c-r-downloads">www.zolldata.com/c-r-downloads</a></p>		
<b>1.</b>	<p>Insérer la carte PCMCIA dans la fente pour carte du défibrillateur</p> <p><i>Si l'appareil est déjà allumé, les données seront sauvées dès à présent. (les données précédentes sont perdues)</i></p>	
<b>2.</b>	<p>Lorsque le cas est terminé, retirer la carte PCMCIA du défibrillateur et l'insérer dans le lecteur de carte OmniDrive</p> <p><i>Le lecteur de carte doit être connecté et installé correctement</i></p>	
<b>3.</b>	<p>Démarrer RescueNet Code Review</p> <p><i>Le software doit être installé et démarré correctement</i></p>	
<b>4.</b>	<p>Clicker sur le logo/bouton télécharger cas depuis lecteur de carte</p> <p><i>Les cas seront alors enregistrés dans le dossier choisi (lors de l'installation)</i></p>	
<b>5.</b>	<p>Une barre de progression vous montre l'évolution du téléchargement</p>	
<b>6.</b>	<p>Si désiré, on peut effacer les cas sur la carte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Outils</li> <li>b) Effacer Données</li> <li>c) Du lecteur de carte</li> </ul> <p><i>Si un message windows pour formater la carte apparaît, clicker annuler</i></p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px 0;"> <p>Microsoft Windows</p> <p>Sie müssen den Datenträger in Laufwerk K: formatieren, bevor Sie ihn verwenden können.</p> <p>Möchten Sie ihn formatieren?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Datenträger formatieren"/> <input type="button" value="Abbrechen"/> </p> </div> <p><i>Si désiré, on peut activer l'effacement automatique de la carte automatique après téléchargement (menu configuration)</i></p>	