



## ZOLL E SERIES

# Guide Utilisateur

### Transmission ECG 12-Dérivations – NOUVELLE CAPTURE

-  Presser la touche **<12 Dér.>** (être en mode manuel)
-  **Presser <Saisir>**. Et attendre...  
(câble ECG 12 dér. doit être connecté. Bien vérifier que vous êtes sur une **dérivation ECG**, pas sur les **Patches**)
-  Sélectionner le destinataire (ex. CHUV ou TEST), confirmer avec **<transm. mainten.>**  
(le mobile de transmission doit être activé)
-  Quand le message „**transmission terminée**“ apparaît, la transmission a été effectuée avec succès.

### Transmission ECG 12-Dérivations - EXISTANT

-  Presser la touche **<12 Dér.>**
-  Sélectionner **<info pat>** puis ensuite **<Traces 12 Deriv>**
-  Choisir l'ECG désiré et confirmer avec **<transm.>**  
(le mobile de transmission doit être activé)
-  Sélectionner le destinataire (ex. CHUV ou TEST) , confirmer avec **<transm.mainten.>**  
(le mobile de transmission doit être activé)
-  Quand le message „**transmission terminée**“ apparaît, la transmission a été effectuée avec succès.