

Manutenzione e cura

ZOLL AED 3

Controllo dello stato del dispositivo

Il defibrillatore ZOLL AED 3 esegue test automatici settimanali. Non è necessaria alcuna manutenzione aggiuntiva. Per garantire che il defibrillatore sia sempre pronto all'uso, il produttore consiglia di verificare settimanalmente i seguenti punti (non è necessario accendere il dispositivo per farlo):

1. Controllare stato via finestra



= **Dispositivo pronto all'uso**
(dispositivo, batteria ed elettrodi OK)



= **Dispositivo non pronto all'uso**
Valutazione dei risultati dell'autotest

Se la finestra di stato diventa nera a causa della batteria, il dispositivo può ancora somministrare almeno 9 scariche alla massima energia.

2. Controllare l'allarme dell'armadietto a parete (se presente)



Sostituzione della batteria e degli elettrodi

Quando il defibrillatore non è in uso, la durata di elettrodi e batteria è di circa 5 anni. Quando la data di scadenza degli elettrodi o il 24% della capacità residua della batteria viene raggiunto, la spunta verde scompare.

Istruzioni per la sostituzione della batteria e degli elettrodi

1. Scollegare i vecchi elettrodi dall'AED e collegare i nuovi elettrodi. (Fig. 1)
2. Rimuovere la vecchia batteria dal retro dell'AED (premere la connessione a scatto). Dopo 30 secondi, inserire la nuova batteria. Assicurarsi che il connettore a scatto sia completamente fissato sia in alto che in basso. Dopo la sostituzione della batteria, l'AED si accende automaticamente per eseguire un autotest. Questo test può durare fino a 60 secondi. Successivamente, il dispositivo si spegne automaticamente. (Fig. 2)
3. Riporre il pacchetto di elettrodi nel compartimento degli elettrodi sul retro dell'AED. (Fig. 3)
4. Controllare il display dello stato per verificare se il dispositivo è pronto all'uso. L'AED si accenderà brevemente e poi si spegnerà. Se non compare ancora la spunta verde, seguire i passaggi sotto "Valutazione dei risultati dell'autotest". (Fig. 4)

Fig. 1

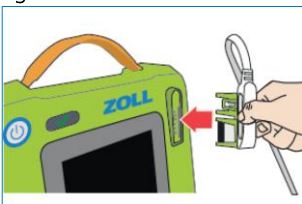


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Manutenzione e cura


ZOLL AED 3

Valutazione dei risultati dell'autotest

Se l'autotest non riesce (nessuna spunta verde), seguire questi passaggi per determinare la causa:




1. Premere a lungo il pulsante di accensione (> 5 secondi) fino alla comparsa del logo blu ZOLL.

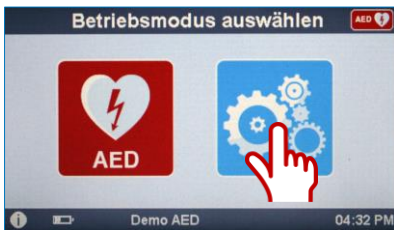


2. Premere l'icona "Configurazione del dispositivo" per aprire lo schermo di configurazione.




3. Premere l'icona "i" in basso a sinistra dello schermo.

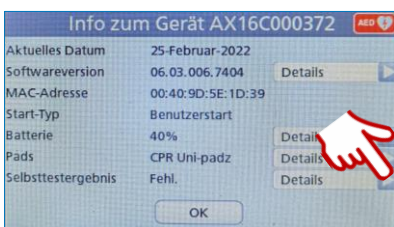

4. Controllare i dettagli relativi a "Batteria" per visualizzare la capacità residua e a "Risultato dell'autotest" per ulteriori dettagli.

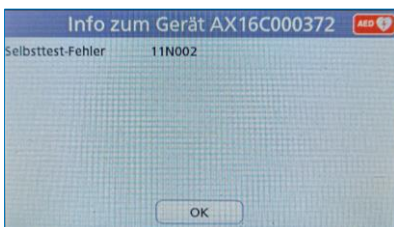

5. Interpretazione dei possibili risultati:
02N002 → Sostituire la batteria
11N001 → Cavo dell'elettrodo non collegato
11N002 → Elettrodi scaduti
 Per altri risultati, contattare Procamed SA (info@procamed.ch).

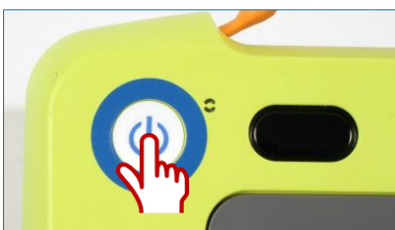

6. Spegner l'AED 3 premendo il tasto di accensione per circa 2 secondi.