

# BeneHeart Review

## Panoramica e Informazioni

### Panoramica

BeneHeart Review è una versione software gratuita, installata localmente, di Mindray per la valutazione dei dati dei casi dei defibrillatori Mindray (Mindray BeneHeart C1A, Mindray BeneHeart C2).

### Software

Il software vi sarà fornito da noi. Vi preghiamo di contattarci e vi metteremo immediatamente a disposizione il software.

Il software e il suo utilizzo sono gratuiti, tuttavia deve essere scaricato come amministratore, altrimenti i PDF conterranno filigrane.

### Procedura Import/Export Dati con BeneHeart Review

<ol style="list-style-type: none"> <li>Preparare il DAE             <ul style="list-style-type: none"> <li>Rimuovere le due viti sul retro e aprire il coperchio.</li> <li>Inserire la chiavetta USB nello slot.</li> <li>Aprire il coperchio anteriore del defibrillatore e lasciarlo aperto per 10 secondi per trasferire i dati del caso.</li> <li>Dopo 10 secondi, chiudere il coperchio, rimuovere la chiavetta USB e riavvitare il coperchio.</li> </ul> </li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Importare/valutare i dati dei casi             <ul style="list-style-type: none"> <li>Avviare BeneHeart Review. Sotto la voce „File“, selezionare „Import“ e navigare fino alla chiavetta USB con i dati esportati: Savior → Selezionare il numero di serie del DAE → clicca sulla cartella PAT e confermare con OK.</li> <li>Selezionare il caso desiderato a sinistra sotto „Archives ID“.</li> <li>Attraverso le schede nel BeneHeart Review, è possibile visualizzare tutte le informazioni.  Come stampare o salvare il riepilogo del tracciato ECG: ECG Review → Print</li> </ul> </li> </ol>	

# BeneHeart Review

## Panoramica e Informazioni

### Rappresentazione

